


輸液ゲージ 長方形

●面倒な計算をすることなく、滴下速度をどのくらいにしたら良いかを、簡単に求められます。

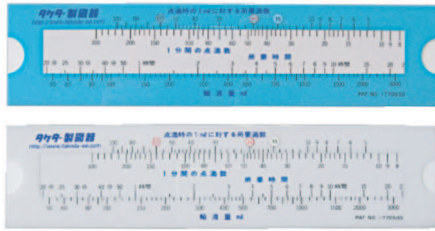


品番	規格	税抜価格
25-3060	輸液ゲージ長方形 ブルー	¥700
25-3080	輸液ゲージ長方形 ホワイト	¥700



輸液ゲージ 丸型

●面倒な計算をすることなく、滴下速度をどのくらいにしたら良いかを、簡単に求められます。

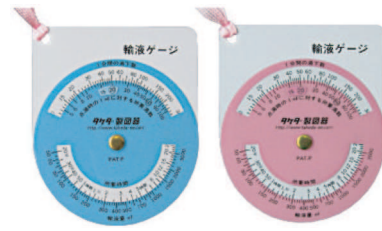

品番	規格	税抜価格
25-3040	輸液ゲージ丸型 ブルー	¥700
25-3050	輸液ゲージ丸型 ピンク	¥700



メディカルデバイダー

(2×RR 25mm/Sec目盛印刷)

- 2つのR波の頂点をデバイダーで測り、ケースに印刷されている目盛の↑矢印へデバイダー片方の針先を合わせる、もう片方の針先の目盛を読取ると1分間の心拍数が簡単に分かります。
- 2×RR ペーパースピード 25mm/sec




品番	規格	税抜価格
11-0381	メディカルデバイダー(アルメケース・クリップ付)	¥2,500



メディカルデバイダー2

(2×RR 25mm/Sec目盛印刷)

- 2つのR波の頂点をデバイダーで測り、ケースに印刷されている目盛の↑矢印へデバイダー片方の針先を合わせる、もう片方の針先の目盛を読取ると1分間の心拍数が簡単に分かります。
- 2×RR ペーパースピード 25mm/sec

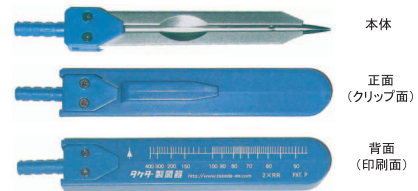


品番	規格	税抜価格
11-0382	メディカルデバイダー2	¥1,300



心電図スケール

(2×RR 25mm/Secタイプ)

- 心電図のR波の1つに↑矢印を合せると、2つ目のR波で1分間の心拍数が分かる。
- 左右の長さ・上下の長さのブレなどが測れる。
- QTインターバル(QTC)左のスケールR波間の頂点を合せると、左のタテ長方形の中にT波が終われば正常です。

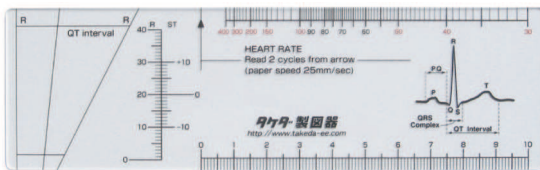

品番	規格	税抜価格
25-3030	心電図スケール	¥500



メディカルデバイダー・心電図スケールセット (NEW)

- メディカルデバイダー・心電図スケールセットでシースに入り使いやすいセットです。




品番	規格	税抜価格
25-3070	メディカルデバイダー・心電図スケールセット	¥3,300
25-3072	メディカルデバイダー・NEW心電図スケールセット	¥3,350



NEW 心電図スケール

- 心電図のR波の1つに↑矢印を合せると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。
除脈の場合や変動を測る場合には、2つ目のR波で赤色の表示を読んで下さい。(ペーパースピード25mm/sec)
- STの変化を計測します。
基線(T-P間の平坦部又はQ波の直前を結ぶ線)を0の点線に合わせて、STの偏位を計測します。
基線(ST)が変動(斜め)になったときなど、便利に御使用いただけます。
- R/Sの目盛りは、R波・S波の高さの測定に使用します。
- QTインターバル(QTC)
左の垂直線にR波(Q波)の始まりを揃え、次のR波の始まりが、右側の斜線に合うようスケールを上下します。
合ったところでQT波の終わりが、中央の点線の左側に納まっていればQTcの延長はありません。
RR1.0の横線を入れました(平行が分かり易くしました)
QTcの計算公式を表示しました。

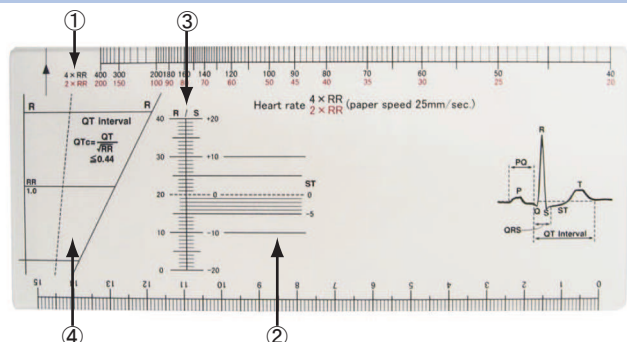

品番	規格	税抜価格
25-3032	NEW 心電図スケール	¥550

